


Medilogic mittaustietojen pakkauksen purku 7Zip-ohjelmalla

Medilogic mittaustietojen varmuuskopion pakattu tiedostopaketti (BACKUP MEDILOGIC.zip) on yksi tiedosto joka sisältönä on "backup.mdb" tiedosto ja alikansio "Data" ja kaikki siellä olevat tiedostot. Paketin purun voi tehdä 7zip-ohjelmalla.


Varmuuskopioidun pakatun tiedostopaketin purku

Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta-ohjelma. Varmista että työasemassa on kansio "c:\backup medilogic". Poista vanha varmuuskopio eli tiedosto "Backup.mdb" ja kansio "Data" tiedostoineen.

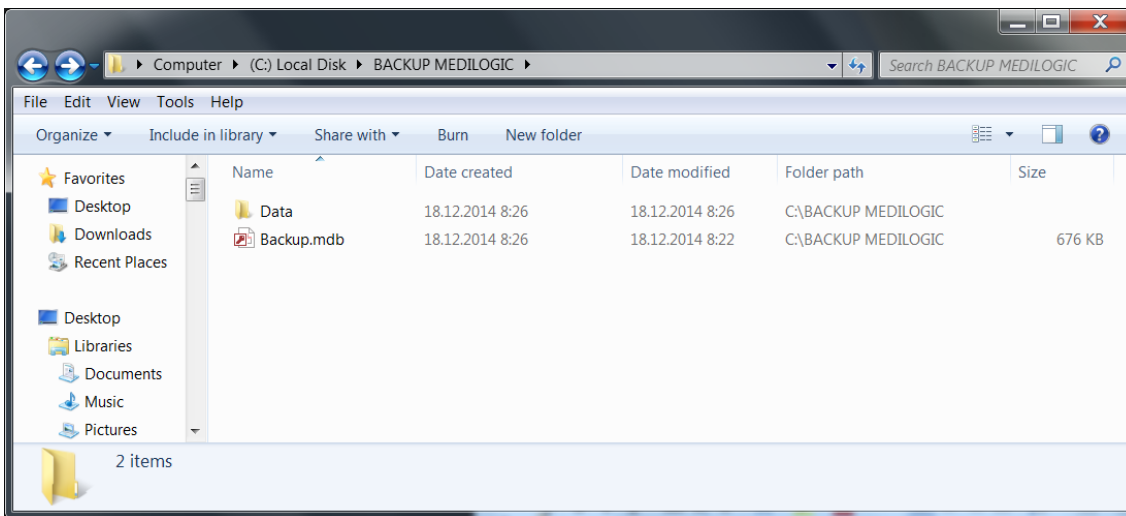


Siirrä saamasi tiedostopaketti "BACKUP MEDILOGIC.zip" kansioon C:\temp\backup. Tee tuo kansiorakenne jos sitä ei ole.


Kopioinnin jälkeen tilanteen pitäisi näyttää kuvan mukaiselta.

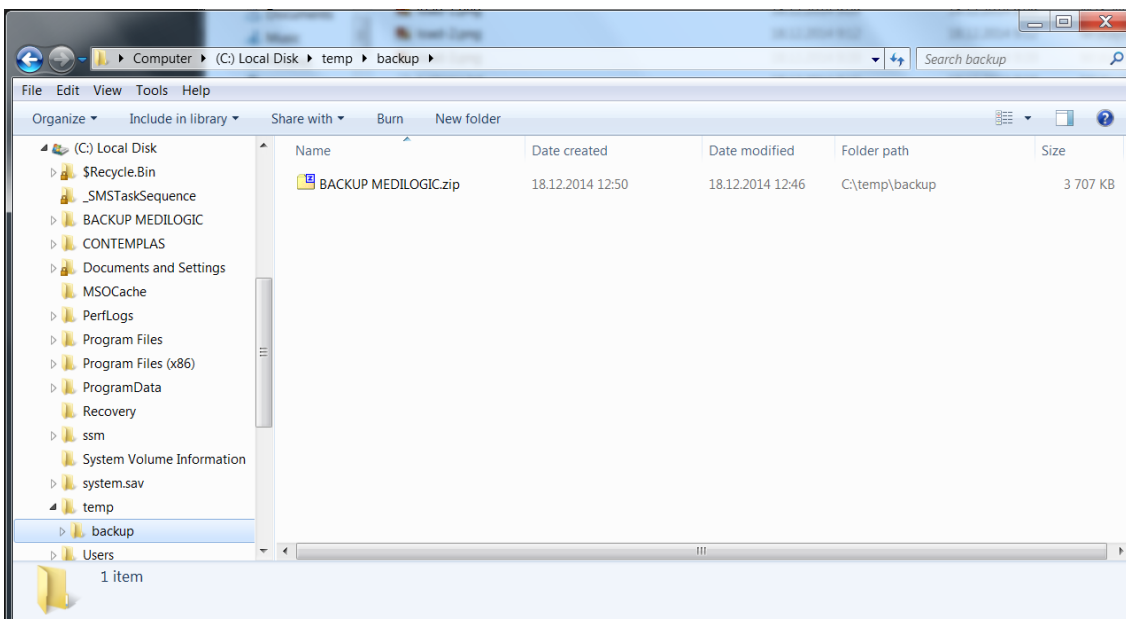

Valitse hiirellä tiedosto ”BACKUP MEDILOGIC.zip”. Napauta uudesta hiiren oikealla tiedostoa ja valitse aukeavasta valikosta ”Extract Here”. Paketti puretaan C:\temp\backup kansioon.

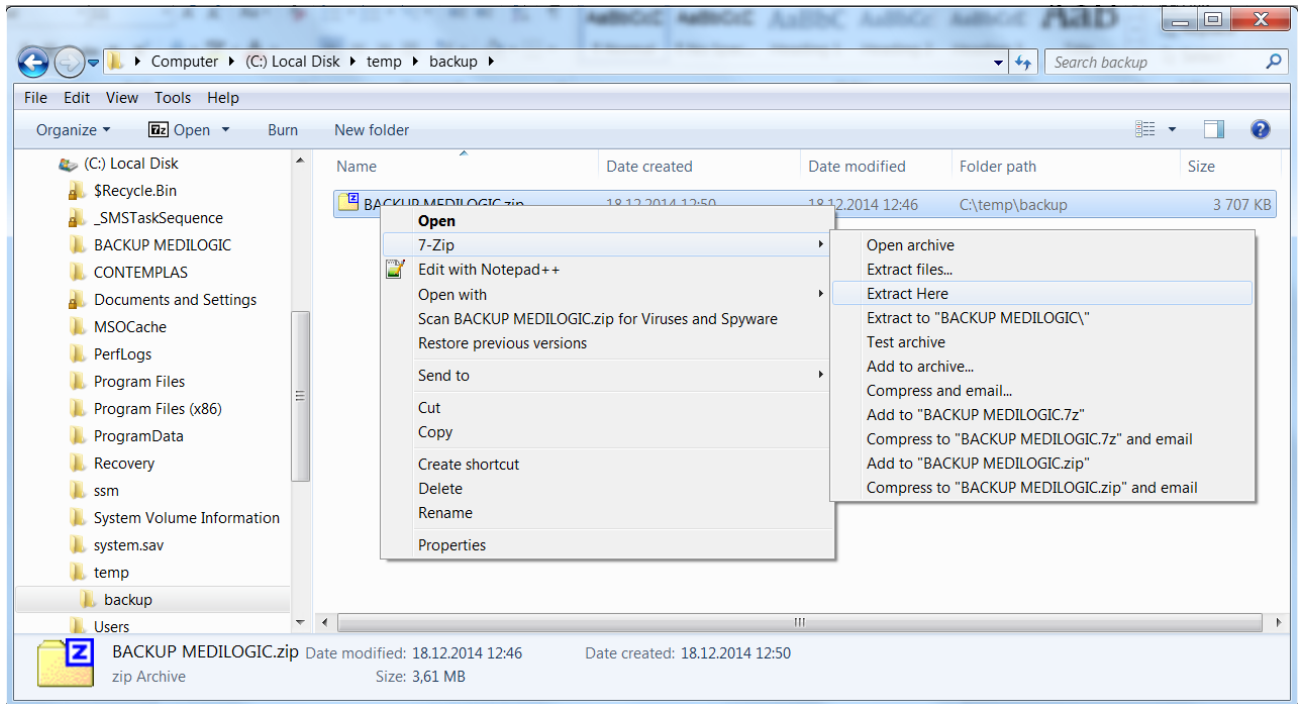

Kansiossa on puretun paketin sisältö. Tiedosto ”Backup.mdb” ja kansio ”Data” ja siellä olevat ”.fus” päätteiset tiedostot.

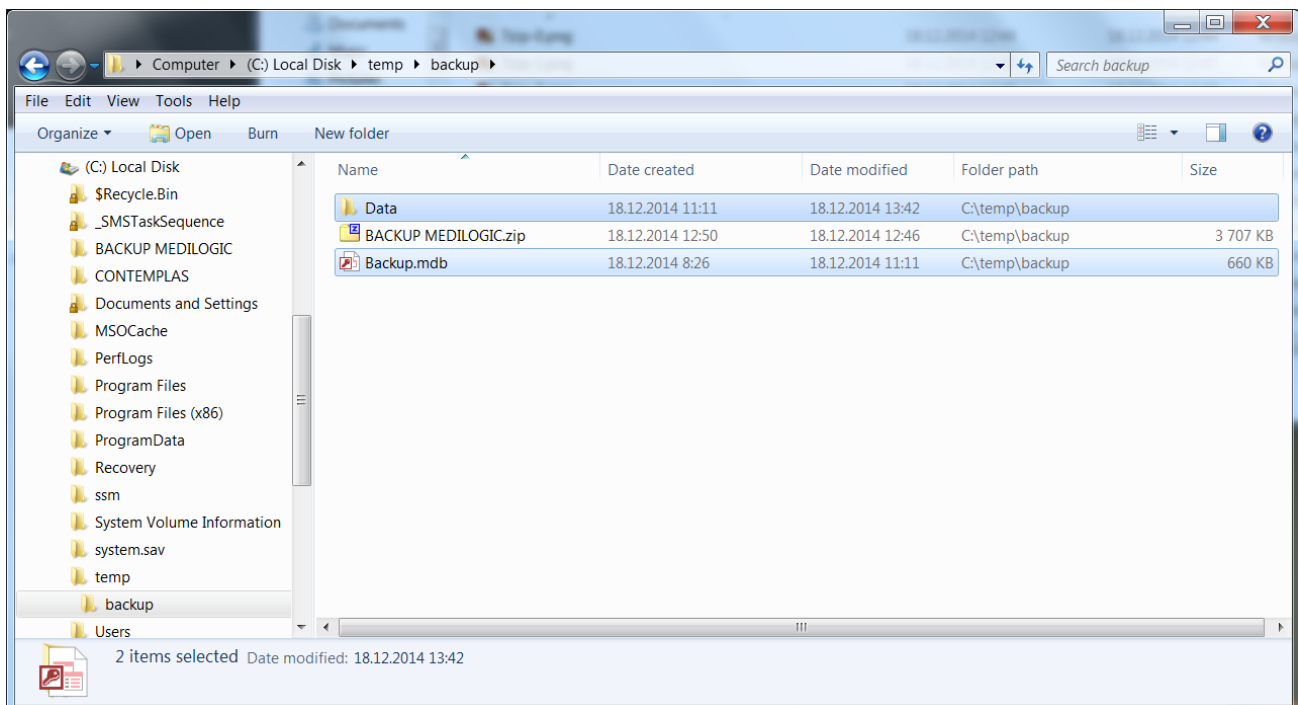

Kopioi ne kansioon ”C:\BACKUP MEDILOGIC”. Tämän jälkeen ne voi ladata Medilogic-ohjelmalla käyttöön. Ohjeet löytyvät dokumentista ” Medilogic tietokannan palautus”